

Chirurgische Clipper von BD

Handhabung

1. Scherkopf einsetzen

Ziehen Sie Handschuhe an und setzen Sie einen neuen Scherkopf auf das Kopfteil. Richten Sie die Markierung auf der Klinge am Pfeil aus. Schieben Sie den Scherkopf zum Punkt hin, bis er hörbar einrastet.



2. Haare entfernen

Halten Sie den Griff des Clippers wie einen Stift. Straffen Sie die Haut, setzen Sie den Scherkopf flach auf der Haut auf und führen Sie den Clipper entgegen der Haarwuchsrichtung.



3. Scherkopf entfernen

Schalten Sie den Clipper aus, halten Sie ihn mit der Klinge nach unten gerichtet über einen Abfallbehälter für scharfe Instrumente und drücken Sie den Scherkopf mithilfe Ihres Daumens nach vorne.



4. Griff des Clippers reinigen

Reinigen Sie den Griff des Clippers gründlich mit Wasser und Seife. Wischen Sie das Gerät danach mit einem Flächendesinfektionsmittel ab oder tauchen Sie den Griff maximal 30 Minuten* lang in ein Desinfektionsmittel.



5. Aufladen und aufbewahren

Stellen Sie den Clipper aufrecht in die Ladestation. Die Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht eine längere Laufzeit und verbessert die Energieeffizienz. Die Aufladewarnleuchte blinkt, wenn der Clipper geladen werden muss.**



Tipps

- Setzen Sie die Basis des Scherkopfes immer flach auf die Haut des Patienten auf. Ändern Sie nicht den Winkel der Klinge beim Versuch, das Haar näher an der Hautoberfläche zu entfernen. Es ist nur wenig oder kein Druck nach unten für die Haar-entfernung durch den Clipper erforderlich.
- Straffen Sie immer die Haut des Patienten mit der einen Hand und führen Sie die Rasur mit der anderen Hand durch, um eine gleichmäßige Oberfläche für die Haarentfernung sicherzustellen. Diese Technik ist besonders wichtig in Arealen mit schlaffer Haut. Vermeiden Sie die Rasur von Wucherungen oder anderen Hautanomalien.
- Schieben Sie den Clipper immer mit einer sanften Bewegung von sich weg. Ziehen Sie den Clipper nicht über die Haut des Patienten in Ihre Richtung, und wenden Sie niemals mehr Kraft als nötig an.



Bestellinformationen

Bestell-Nr.	Produktbezeichnung	VE (Stück)
5513E	Wiederaufladbarer Chirurgischer Clipper	1
5514E	Ladestation	1
4406	Universal-Scherkopf	50
4412A	Neuro-Scherkopf	20
4403A	SensiClip™ Scherkopf	20

Diese Handhabung ist für alle Chirurgischen Clipper von BD gültig.

* Die BD Chirurgischen Clipper können mit milden Desinfektionsmitteln oder Desinfektionstüchern gereinigt werden. Sie können vollständig eingetaucht werden, und sie sind die einzigen IXP-7-klassifizierten wasserdichten Clipper. Die Clipper können bis zu 1 Meter Tiefe und maximal 30 Minuten eingetaucht werden. Durch Desinfektionsmittel, die Benzylalkohol enthalten, kann das Außengehäuse bzw. die Ladestation chemisch beschädigt werden. Der Garanzzeitraum für das Produkt wird dadurch ungültig.

** Um den Energieverbrauch zu reduzieren wird empfohlen, die Ladestation vom Stromanschluss zu trennen, sobald die orangefarbene Leuchte erloschen ist. Dies bedeutet, dass das Gerät vollständig geladen ist.

Autorisierte Händler



hcp-austria
Traunstraße 46 · A-5026 Salzburg
t: +43 (0)662/62 12 43 · f: DW -11
office@hcp-austria.com
www.hcp-austria.com



Fumedica AG
Luzernerstrasse 91 · CH-5630 Muri
t: +41 (0)56 675 91 00 · f: +41 (0)56 675 91 03
fumedica@fumedica.ch
www.fumedica.ch

Weitere Informationen finden Sie auf: bd.com/surgicalclippers

CE Der Clipper und sein Zubehör sind Medizinprodukte der Klasse I sowie CE-gekennzeichnet gemäß der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EC. Beachten Sie die vollständige Bedienungsanleitung gemäß Packungsbeilage des Clippers.



Becton, Dickinson and Company
75 North Fairway Drive
Vernon Hills, IL 600691
USA



BD Switzerland Sàrl
Terre Bonne Park – A4
Route de Crassier 17
1262 Eysins, Switzerland